

Technisches Datenblatt



SAWA DESINFEKTIONSTÜCHER

Stand: 15.07.2021

Produktbeschreibung

SAWA DESINFEKTIONSTÜCHER sind gebrauchsfertige auf Wasserbasis desinfizierende Tücher. Sie werden in Kombination mit SAWA Flächendesinfektion verwendet und bieten eine Alternative zu konventionellen alkoholischen Desinfektionstüchern. SAWA DESINFEKTIONSTÜCHER eignen sich für die Desinfektion von Oberflächen aller Art. Eine Vorreinigung mit SAWA Base Fettlöser wird empfohlen.

Anwendung

SAWA DESINFEKTIONSTÜCHER werden wie folgt vorbereitet: Geben Sie eine Rolle SAWA VLIESTÜCHER in den leeren Spendeimer und füllen Sie den Kübel mit 1,25 Liter SAWA Flächendesinfektion. Nach einer Einwirkzeit von einer halben Stunde sind die SAWA DESINFEKTIONSTÜCHER gebrauchsfertig. Nach der Befüllung mit SAWA Flächendesinfektion wird eine Mindesthaltbarkeit von drei Wochen garantiert. Mit den befeuchteten Desinfektionstüchern können betroffene Flächen desinfiziert werden. Einwirkzeiten gemäß Etikett des Spendeimers beachten.

Vorteile

- effektiv gegen Bakterien
- wirkt gegen Pilzsporen
- wirkt „begrenzt viruzid“ gegen behüllte Viren (inkl. SARS-CoV-2) (geprüft nach EN 14476)
- alkoholfrei und aldehydfrei
- nicht brennbar
- zum Entfernen von Biofilmen geeignet

Anwendungsvorschriften

Kann bei Textilien zu geringen Verfärbungen und bei Metallen zur Korrosion führen. Sicherheitshalber sollte vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle die Farbechtheit der Oberflächen überprüft werden. Sicherheitstechnische und ökologische Daten sind dem Sicherheitsdatenblatt der SAWA Flächendesinfektion zu entnehmen. Zu Anwendungsvorschriften der SAWA Flächendesinfektion lesen Sie das Etikett und das

Technische Datenblatt. Bei der Verwendung der SAWA DESINFEKTIONSTÜCHER sollten Handschuhe (Plastik) getragen werden.

Technische Daten

Siehe Technisches Datenblatt der SAWA DESINFEKTION

Lagerung

Trocken bei 4-35 °C lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Wenn der Spendeimer nicht in Verwendung ist, ist sicherzustellen, dass der Deckel fest verschlossen ist, um die angegebene Haltbarkeit zu gewährleisten.

Sicherheitshinweise

Siehe Sicherheitsdatenblatt der SAWA Flächendesinfektion

Erhältliche Gebindegrößen

SD-SE810 Flächendesinfektion Spendeimer inkl. 10 Liter Kanister SAWA Flächendesinfektion, 8 Rollen Fließ, 1 Kübel
Karton 1 Stk.

SD-SD65 Flächendesinfektion Spenderdose inkl. 5 Liter Kanister SAWA Flächendesinfektion, 3 Rollen Fließ, 1 Dose,
Karton 1 Stk.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und weiteren Entwicklungen bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen in Eigenverantwortung die Eignung des Produkts an Materialien überprüfen. Anwendungshinweise beruhen auf bisherigen Erfahrungen und sind unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden, unsachgemäßer Anwendung oder Zweckentfremdung übernehmen wir keine Haftung.