

SAWA Desinfektionstücher

Stand: 07/2022

Produktbeschreibung

SAWA DESINFektionSTÜCHER desinfizieren Oberflächen effektiv. Oberflächen sollten vor Gebrauch auf Verträglichkeit geprüft werden.

Anwendung

SAWA Desinfektionstücher werden wie folgt vorbereitet: Geben Sie 1 Rolle Vliestücher in den leeren Spendereimer und befüllen Sie diesen mit 1 Liter SAWA Desinfektion. Nach einer Einwirkzeit von 30 Minuten sind die SAWA Desinfektionstücher gebrauchsfertig. Nach der Befüllung mit SAWA Desinfektion wird eine Mindesthaltbarkeit von 3 Wochen garantiert. Mit den befeuchteten Desinfektionstüchern können betroffene Flächen desinfiziert werden.

Einwirkzeiten

Die bakterizide und levurozide Wirkung auf nicht porösen Oberflächen mit mechanischer Einwirkung mit Hilfe von Tüchern wurde nach VAH Methode 14.2 (Einwirkzeit: 1 min) getestet. Viruzid: 5 min (EN 14476).

Vorteile

- effektiv gegen Bakterien
- wirkt gegen Pilzsporen
- wirkt „begrenzt viruzid“ gegen behüllte Viren (inkl. SARS-CoV-2) (geprüft nach EN 14476)
- alkoholfrei und aldehydfrei
- nicht brennbar
- zum Entfernen von Biofilmen geeignet

Anwendungsvorschriften

Kann bei Textilien zu geringen Verfärbungen und bei Metallen zu einer leichten Korrosion führen. Sicherheitshalber sollte vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle die Farbechtheit der Oberflächen überprüft werden. Sicherheitstechnische und ökologische Daten sind dem Sicherheitsdatenblatt der SAWA Desinfektion zu entnehmen. Zu Anwendungsvorschriften der SAWA Desinfektion lesen Sie das Etikett.

Lagerung

Trocken bei 4-25 °C lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Wenn der Spendereimer nicht in Verwendung ist, ist sicherzustellen, dass der Deckel fest verschlossen ist, um die angegebene Haltbarkeit zu gewährleisten.



Erhältliche Gebindegrößen

SD-SD11	1 Spendereimer inkl. 1 Liter SAWA Desinfektion, 1 Rolle Vlies á 90 Tücher
SD-SD65	1 Spendereimer inkl. 5 Liter SAWA Desinfektion, 5 Rollen Vlies á 90 Tücher
SD-SE810	1 Spendereimer inkl. 10 Liter SAWA Desinfektion, 10 Rollen Vlies á 90 Tücher

Technische Daten

Siehe Techn. Datenblatt der SAWA Flächendesinfektion

Sicherheitshinweise

Siehe Sicherheitsdatenblatt der SAWA Desinfektion.

In Verbindung mit SAWA Desinfektion:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und weiteren Entwicklungen bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen in Eigenverantwortung die Eignung des Produkts an Materialien überprüfen. Anwendungshinweise beruhen auf bisherigen Erfahrungen und sind unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden, unsachgemäßer Anwendung oder Zweckentfremdung übernehmen wir keine Haftung.